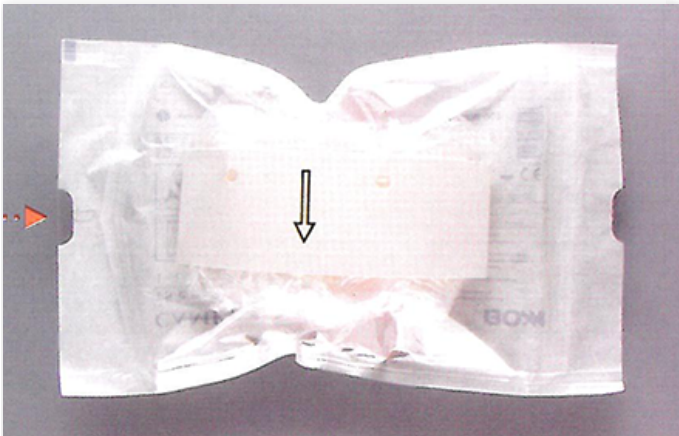


Camera Cover wird zur Abdeckung von medizinischen Geräten während chirurgischer Operation verwendet. Es ist eine universelle Abdeckung für alle Kameras und Endoskopen. Es schützt den OP-Saal vor Kontaminationen und bildet eine komplette sterile Barriere. Sie schützt auch medizinische Geräte vor Beschädigung und Verunreinigung. Dank der Elastizität und Weichheit des Materials ermöglicht eine leichte und einfache Handhabung während der OP.

1

Die Folien-Papier-Verpackung durch das Abreißen der Folie vom Papier an der Stelle aufbrechen, wo die Schweißnaht als "V" ausgebildet ist, und die Abdeckung herausnehmen.


2

Die sterile Optik in dem konischen Ausschnitt des Vorderteils des Schlauchs anbringen und mit dem bunten Klebeband befestigen, das dazu von der Unterlage abzureißen ist.

3

Die sterile Optik in dem konischen Ausschnitt des Vorderteils des Schlauchs anbringen und mit dem bunten Klebeband befestigen, das dazu von der Unterlage abzureißen ist.

4

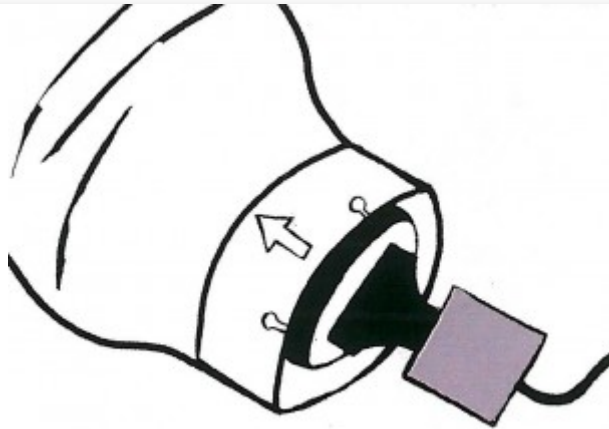


Dem Kamerakopf durch den Kartonaußenring in Pfeilrichtung durchstecken.

5




Die Optik mit der Kamera in der Abdeckung verbinden.

6

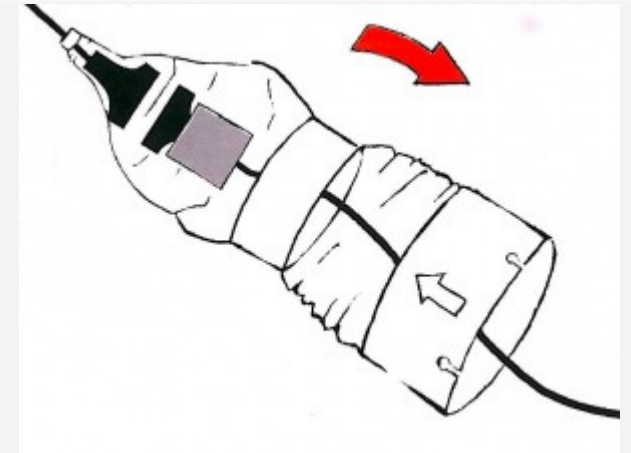


Die Folienabdeckung auf die gesamte Länge der Leitung auseinanderziehen.

7

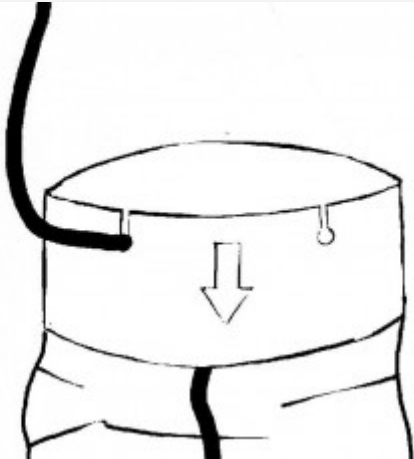

Die Abdeckung an der Leitung mit Hilfe des Außenkartons und der drin ausgesparten Öffnungen befestigen.

8

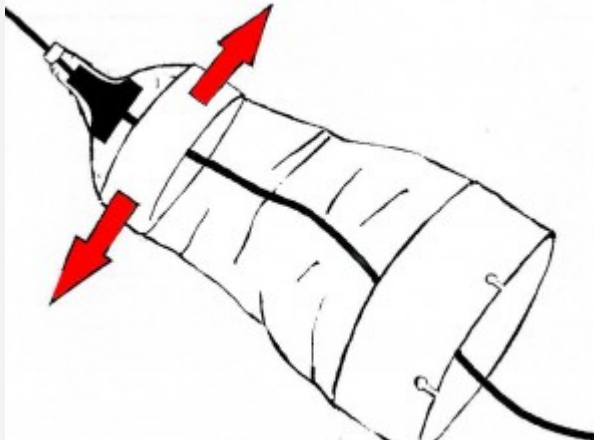

Nach dem Auseinanderziehen der Abdeckung kann der Außenring weggenommen (durch das Abreißen des Klebebands) und entsorgt werden.