


GEBRAUCHSANWEISUNG - NABELSCHNURKLEMME



ACHTUNG!

Eine falsche Platzierung der Klemme an der Nabelschnur kann zu einer unzureichenden Verschluss führen und damit den Verlust von Blut bei Kinder, der tödlich sein kann. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Verwendung des Produkts.

1. Vor der Verwendung den Verschluss überprüfen. Die Klemme darf nicht verwendet werden, wenn das System unvollständig oder blockiert ist.
2. Überprüfen Sie die Dicke der Nabelschnur. Bei einer dünnen Nabelschnur kann es notwendig sein, diese zu falten um einen größeren Widerstand beim Verschließen der Klemme zu erzielen.
3. Platzieren Sie die Nabelschnur in der Mitte der Klemme.
4. Überprüfen Sie, dass kein Objekt diesen Platz blockiert (z.B. eine Kompresse, chirurgische Instrumente, usw.).
5. Schließen Sie die Klemme bis diese vollständig einrastet und ein Klicken zu hören ist. Überprüfen Sie, ob die Klemme vollständig geschlossen ist und sie nicht mit der Hand geöffnet werden kann. Um ein Abrutschen der Klemme zu verhindern, durchtrennen Sie die Nabelschnur aus einer sicheren Entfernung.
6. Überprüfen Sie, ob das Ende der Nabelschnur nicht nachblutet.
7. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob es nicht zum ungewollten Blutverlust infolge einer undichten Klemme oder einer beschädigten Nabelschnur kommt.
8. Das Produkt ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
9. Nur für den Einsatz von geschultem medizinischem Personal.

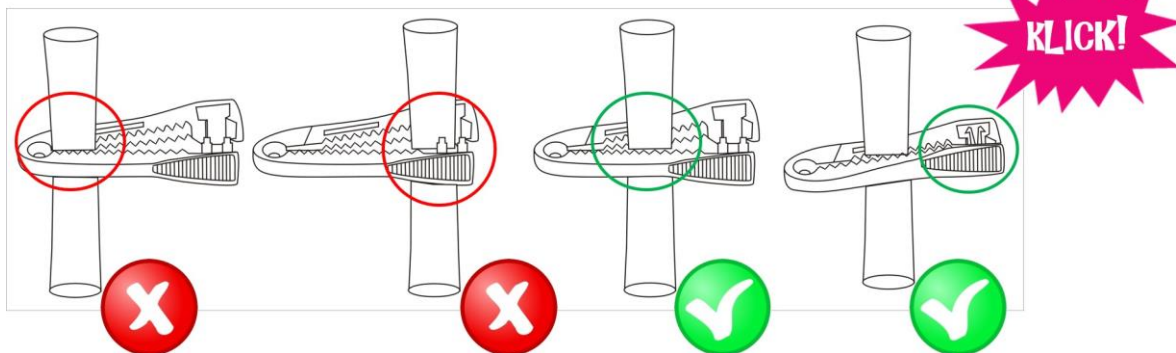

RICHTIG GESCHLOSSENE KLEMME

